





ÖNSÖZ

Bir Umg Uysal şirketi olan Avrupa İmplant, dental implant başta olmak üzere çeşitli alanlarda dental sektöre katma değeri yüksek ürünler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Ana faaliyet alanı dental implant sistemleri olan Avrupa İmplant, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üniversitelerle ortak bilimsel ve teknolojik ar-ge projeleri üretmeyi, kendini ve sektörü geliştirmeyi, alanında öncü konuma yükselmeyi, ülkemize bu anlamda değer ve katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

1976 yılında kurulan Umg Uysal'ın, 1999 yılından günümüze dental sektör ve 2001 yılından günümüze başarısı ulusal - uluslararası arenada tescillenen dental implant tecrübesi bulunmaktadır.

Umg Uysal ile yıllarca medikal - dental sektöre hizmet vermiş alanında uzman kişilerin üretim tecrübelerinin bir araya gelerek hayat verdiği BioInfinity Dental İmplant Sistemi, bilimsel gelişmelerin ışığında yaptığı yenilikçi ar-ge çalışmaları, profesyonel üretim ve kalite kontrol alt yapısı, güçlü satış, teknik destek ve servis ağı ile lider implant markası olma yolunda her geçen gün sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Avrupa İmplant, dinamik gelişim gösteren dental sektörde, sektörün ihtiyaçları ve diş hekimlerinin beklentileri doğrultusunda daha kaliteli ve uygun maliyetli üretim yapabilmek için gerekli bilgi ve alt yapı donanımına sahiptir.

Avrupa İmplant, ürün tasarımından satış sonrası desteğe zincirin her aşamasında Toplam Kalite Yönetimi prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalarak kurumsal kimliği, tecrübesi ve kalite anlayışı ile yurt içinde ve yurt dışında başarıyı elde etmeyi ilke edinmiştir.

BioInfinity Dental İmplant Sistemi; hibrit tasarımı, tersine açılı geniş yivleri, platform kısmında bulunan mini yivleri, OptimOss™ yüzeyi, ConFix™ bağlantısı, platform switch özelliği, iç bükey abutment tasarımı, cerrahi ve protetik aşamada renk kodlaması, kalibrasyon ihtiyacı olmayan torklu ratchet'i, her endikasyona uygun geniş protetik üst yapı seçenekleri ile kliniğinizde sizlere ve hastalarınıza geniş bir konfor sunmaktadır.


BioInfinity'yi tercih etmeniz için çok sebebiniz var!

BioInfinity Bone Level ürün kataloğumuzu keyifle incelemeniz dileğiyle...



Fatih Uysal

Satış ve Pazarlama Direktörü

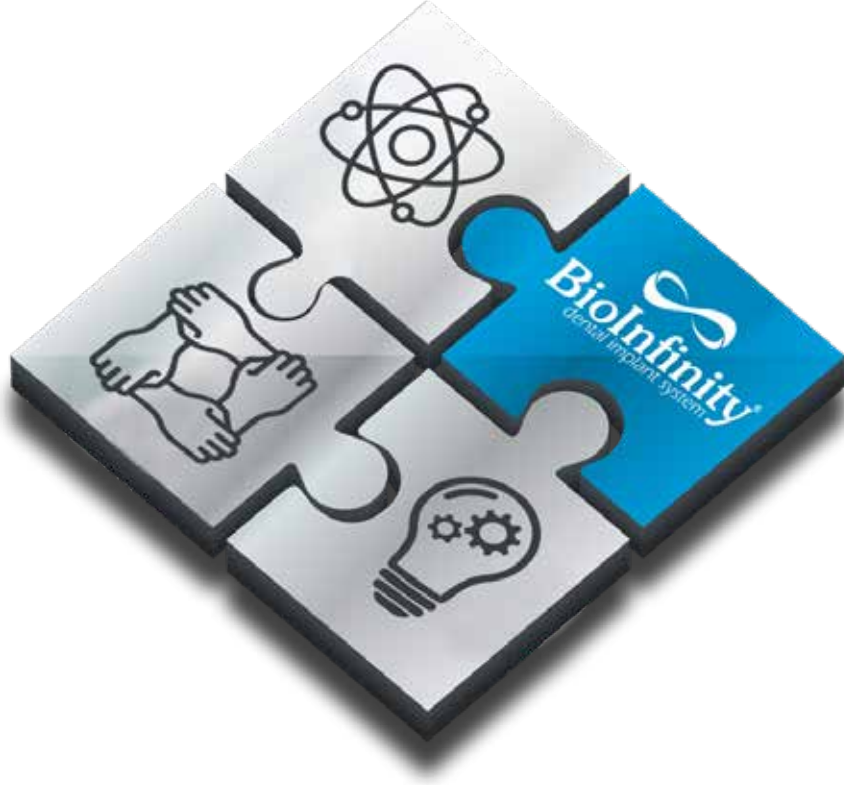

VİZYON

Sunduğumuz hizmet ve ürünlerimizle fark yaratarak, diş hekimi - hasta ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yenilikçi çalışmalarımız ile dental sektörde öncü konuma gelmek, çağdaş bilimi, teknolojiyi, insan ve ahlaki değerleri benimseyerek yurt içinde ve yurt dışında yapacağımız atılımlar ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.

MİSYON

Avrupa İmplant olarak, yüksek kalite standartlarında ürettiğimiz ürünlerin tasarımından satış sonrası desteğe kadar diş hekimi - hasta memnuniyetine öncelik vererek, hastaların yaşam kalitesini artırmak görev ve sorumluluğumuzdur.



KALİTE POLİTİKASI

Avrupa İmplant olarak, insan sağlığı temel politikamızdır. Diş hekimi - hasta ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ürünlerimizi geliştirerek hastaların yaşam kalitesini artırmayı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kaliteden ödün vermeden hatasız, uygun maliyetli ve güvenilir ürün - hizmet sunmayı ilke edindik.

İnsan sağlığı ve kalite bilinci ile yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek, diş hekimi - hasta memnuniyetini ön planda tutarak girişimci ve yenilikçi kadromuz ile süreçlerimizi iyileştirmek, kalite yönetim sistemimizin etkinliğini artırmak görev, taahhüt ve politikamızdır.

İÇERİK

1.....	Önsöz	37.....	Lab Analog
2.....	Vizyon, Misyon	37.....	Lab Abutment Vidası
3.....	Kalite Politikası	39.....	Düz Abutment
5.....	Kalite Kontrol	40.....	Açılı Estetik Abutment
6.....	Temiz Oda	41.....	Geçici Abutment
7.....	Paketleme	41.....	Abutment Tutucu
12/13.....	OptimOss™ Yüzey	42.....	BioBall™ Sistem
14.....	Hibrit Tasarım	44.....	BioLoc™ Sistem
15.....	Platform Switch	46/47.....	Multi Unit Sistem
16.....	Mini Yiv	48.....	UMC
17.....	Tersine Açılı Geniş Yiv	49.....	TiBase Abutment
18.....	ConFix™ Bağlantı	49.....	Pre-milled Abutment
19.....	Eş Merkezli Üretim	49.....	Custom Castable Abutment
20.....	İç Bükey Abutment	49.....	Tarama Parçası
21.....	Renk Kodlaması	49.....	Dijital Analog
22.....	Bone Level İmplant Sistemi	50.....	Abutment Deneme Kiti
25/28.....	Cerrahi Set	51.....	Yıkama ve Sterilizasyon
29.....	Frez Protokolü	52.....	Osstell
30/31.....	Bone Level Short İmplant Sistemi	53.....	Cerrahi Ekipman
35.....	Tork Rehberi	54.....	Advanced Implantology Academy
36.....	Diş Eti Şekillendiricisi	55.....	Semboller
37.....	Transfer Coping	56/58.....	Ürün Listesi






KALİTE KONTROL


Nihai üründe istenilen standart ve kalitenin elde edilebilmesi için BioInfinity dental implant sistemi bileşenleri, tüm üretim süreci boyunca yüksek hassasiyete sahip teknolojik cihazlar ile kalite kontrol departmanımız tarafından büyük bir titizlikle incelenmektedir.



TEMİZ ODA



BioInfinity dental implant sistemi bileşenleri, ISO Class 7 ortam şartlarına sahip temiz odada paketlenmektedir. Temiz odamız; uluslararası standartlarda belirlenmiş kriterlere sahip olup, partikül ve mikroorganizma sayısını kontrol altında tutmak amacıyla düzenli periyotlarda validasyonlara tabi tutulmaktadır.

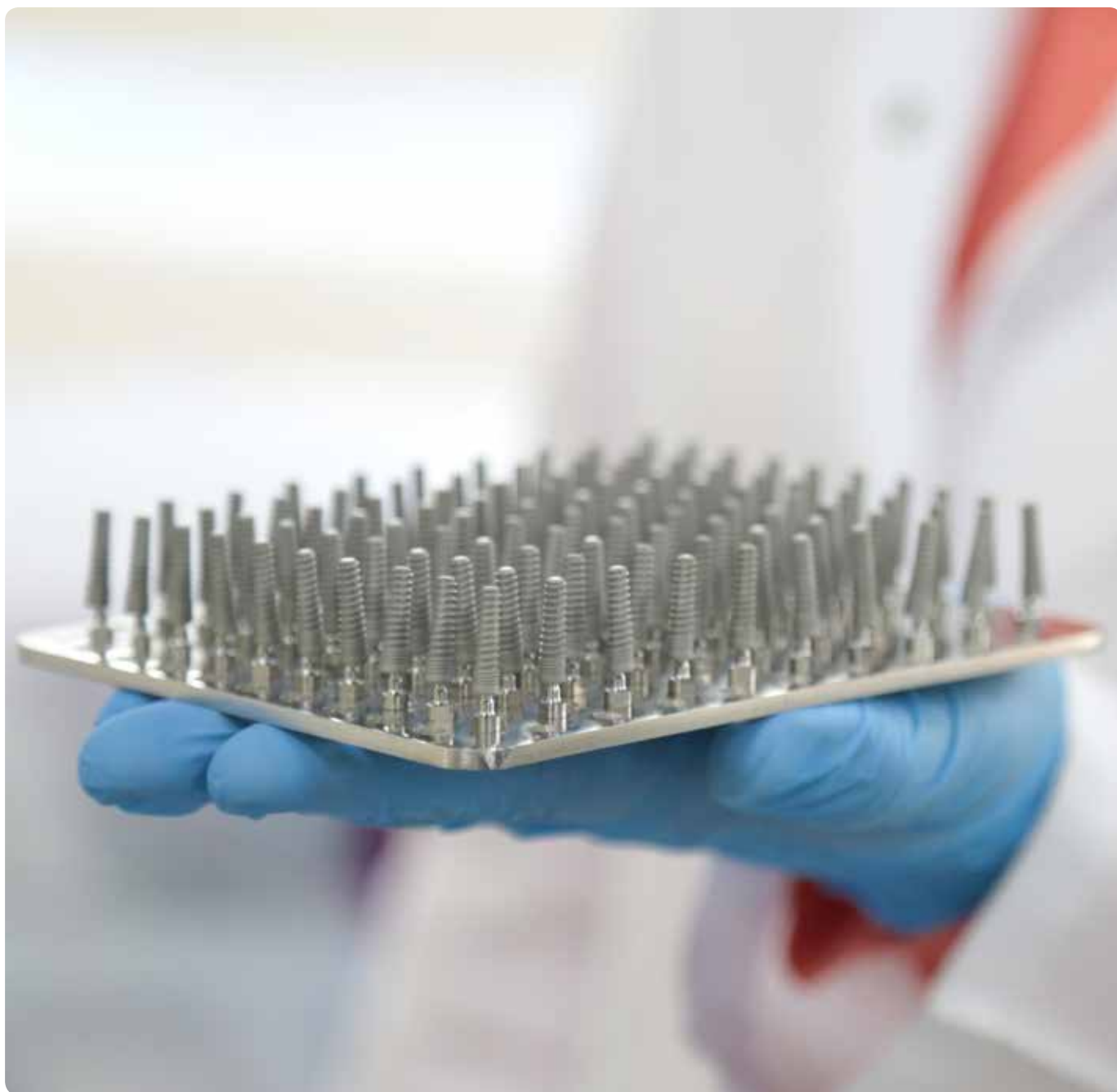

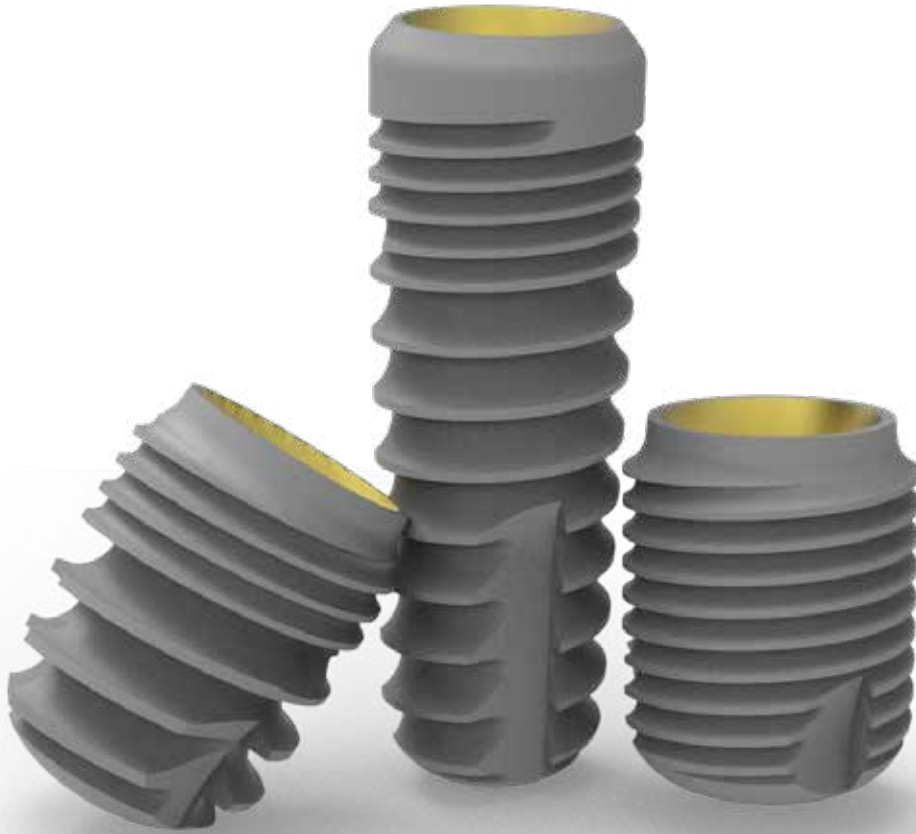


BONE LEVEL İMPLANT SİSTEMİ

BONE LEVEL İMLANT SİSTEMİ

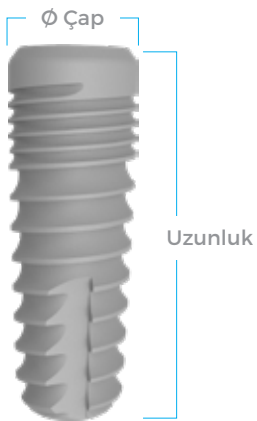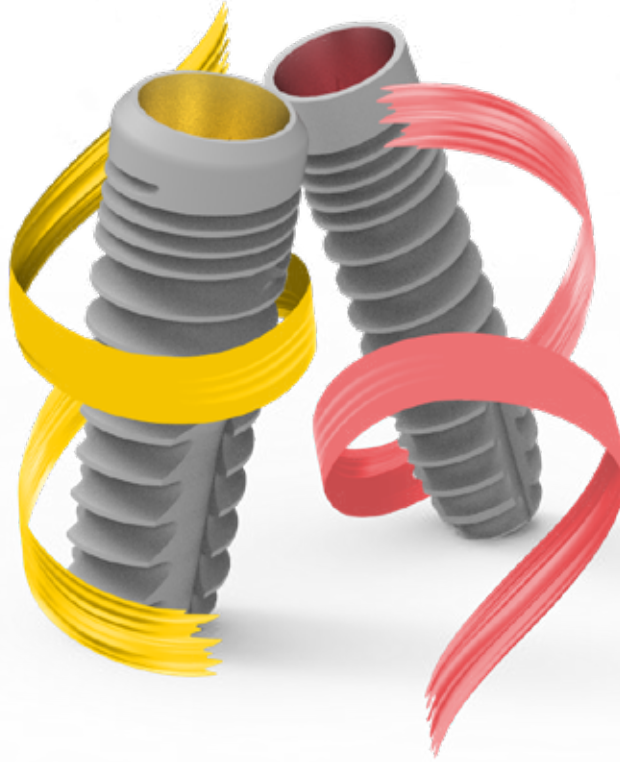

Protetik Platform		Junior 					Standart 				
BONE LEVEL											
İmlant Çapı		Ø 3.2	Ø 3.7	Ø 4.2	Ø 4.7	Ø 5.2					
Uzunluk	8 mm		•	•	•	•					
	10 mm	•	•	•	•	•					
	12 mm	•	•	•	•	•					
	14 mm	•	•	•	•	•					
	16 mm	•	•	•	•						


OptimOss® Yüzey

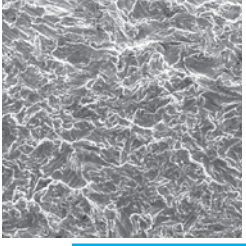

Mini Yiv




Eş Merkezli Üretim

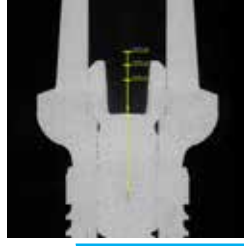

Hibrit Tasarım



Tersine Açılı Geniş Yiv

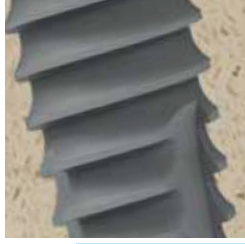

İç Bükey Abutment



Platform Switch



ConFix™ Bağlantı




Renk Kodlaması




BONE LEVEL

OPTIMOSSTM YÜZEY


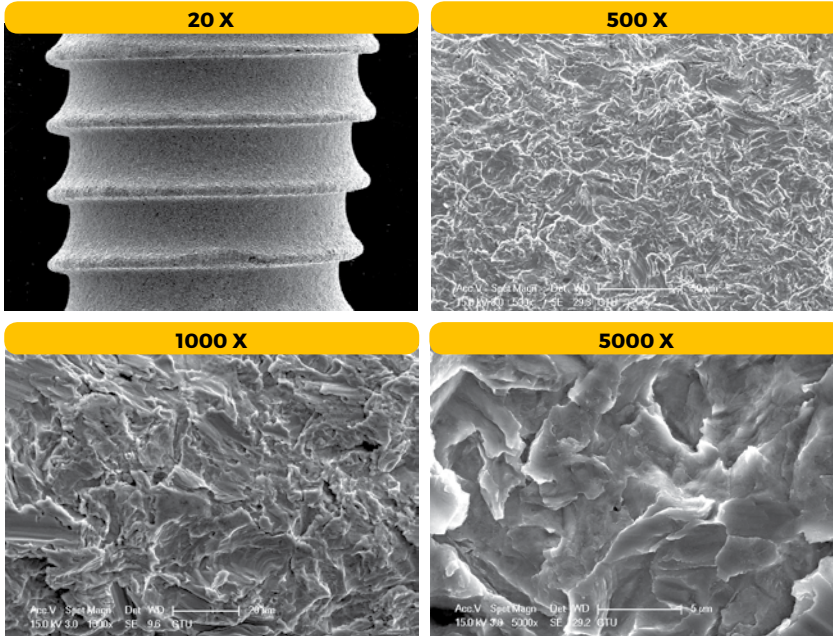


BioInfinity dental implantlarının yüzeyi, teknik bilgisi ABD'den transfer edilen yüzey teknolojisi ile oluşturulmuştur.



Biyouyumlu, osteokondüktif ve rezorbe olabilen BPC (Biphasic Calcium Phosphate) ile pürüzlendirilen yüzeyimiz osseointegrasyona olumlu katkı sağlamaktadır.

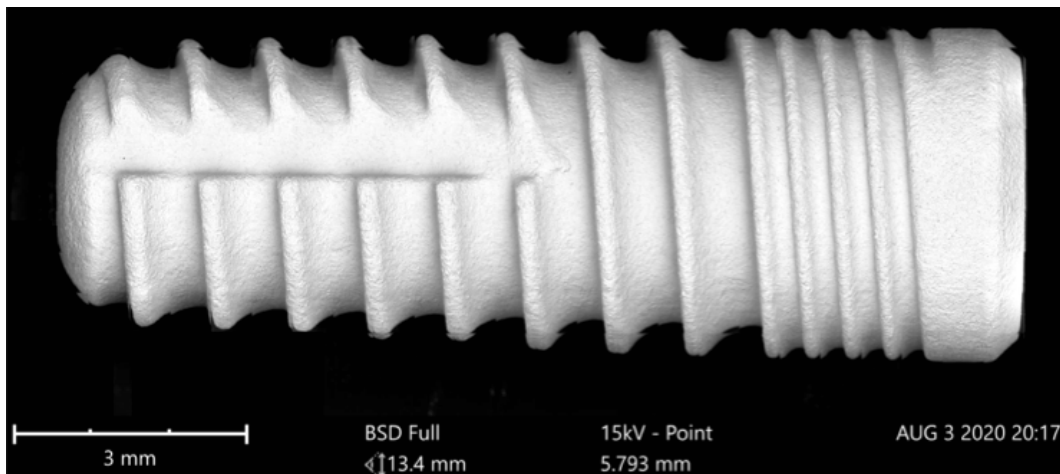

BioInfinity implant görseli Clean Implant "Implant Study 2017-2019" Raporu'ndan alınmıştır.

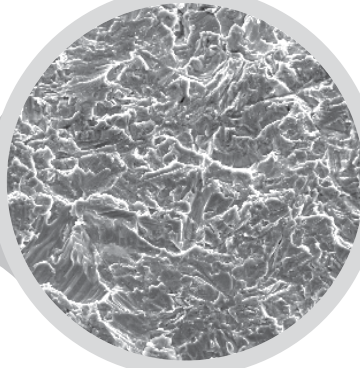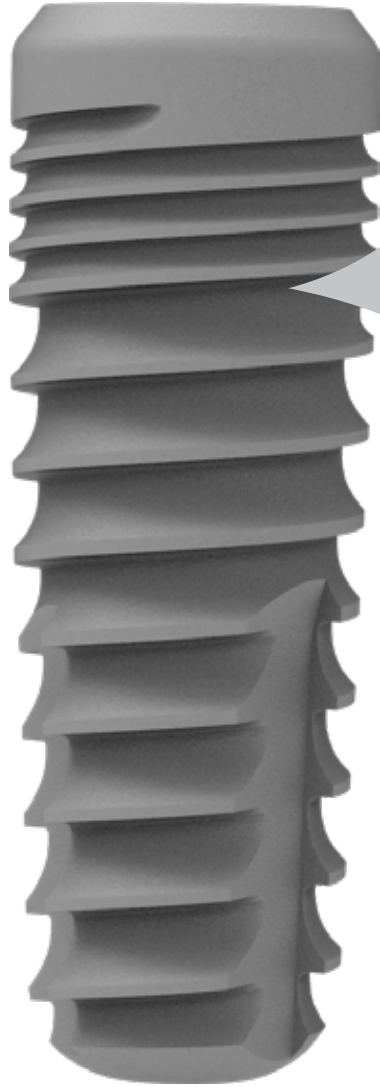

12 hafta sonundaki osseointegrasyonun histolojik kesit görüntüsü*

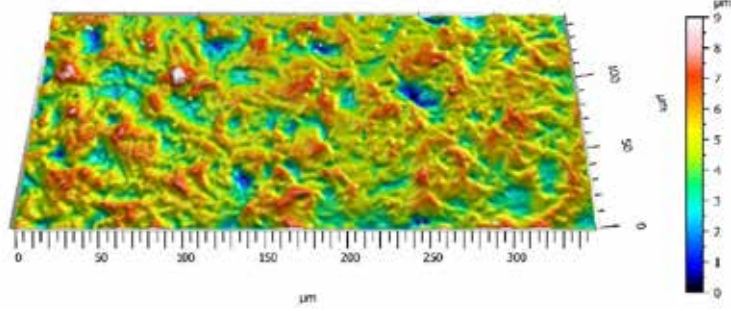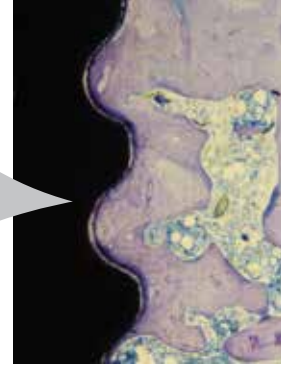

ISO 25178		
Höhen-Parametresi		
Sa	1.589671	um


Orta derecede yüzey pürüzlülüğüne sahip dental implantların osseointegrasyona olumlu katkı sağladığı literatürde sıklıkla yer almaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmalar, BioInfinity dental implantlarının orta dereceli yüzey pürüzlülüğüne (Sa / 1-2 µm) ve homojen bir yüzey morfolojisine sahip olduğunu göstermiştir.

Yüzey işlemi sonrası pürüzlülük ölçümü yapılan BioInfinity dental implantlarının istenilen pürüzlülük değerine sahip olduğu garanti edilmektedir.

*Dundar Serkan, et al. "Comparison of Osseointegration of Five Different Surfaced Titanium Implants." The Journal of Craniofacial Surgery 29.7 (2018): 1991-1995.

**Salimov Fariz, et al. "The effects of repeated usage of implant drills on cortical bone temperature, primary/secondary stability and bone healing: A preclinical in vivo micro-CT study" © 2020 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd., Clin Oral Impl Res. 2020;00:1-7. DOI: 10.1111/clr.13603

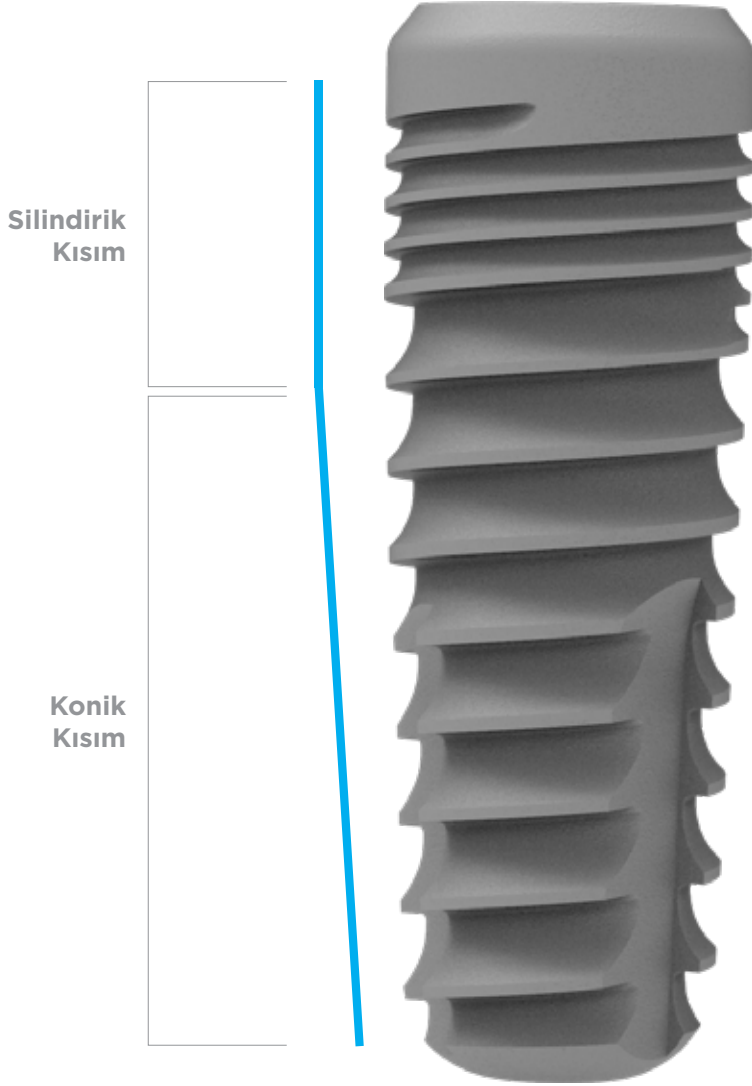

HİBRİT TASARIM

Konik tasarıma sahip implantlar, çene kemiğine daha kısa sürede yerleşerek implantasyon süresini azaltmaktadır. Silindirik tasarıma sahip implantlar ise daha fazla yüzey alanı sağlayarak osseointegrasyona olumlu katkı sağlamaktadır.

BioInfinity dental implantları, konik ve silindirik formların ideal kombinasyonundan oluşan hibrit bir tasarımıdır. Hibrit tasarım ile implantın kemiğe yerleşme süresi azalır, implant çene kemiğine minimum stres ile yerleşir ve maksimum primer stabilite elde edilir.



PLATFORM SWITCH

Dental implantlarda günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de krestal kemik kaybıdır.


Yapılan bilimsel çalışmalar, platform switch özelliğine sahip implantlarda krestal kemik kaybının daha az olduğunu ve gingival papillanın korunarak başarılı bir estetik görünüm sağlandığını göstermektedir.

BioInfinity dental implantları, implant - abutment bağlantısını implantın boyun bölgesinden uzaklaştırarak krestal kemikte rezorpsiyonu minimize eden platform switch özelliğine sahiptir.

MINİ YİV

BioInfinity dental implantlarının boyun kısmında bulunan mini yivler sayesinde marjinal kemik ve yumuşak dokunun korunması sağlanmaktadır.

Mini yivlerin sağladığı optimal yük dağılımı ile marjinal kemik kaybı azaltılmaktadır.


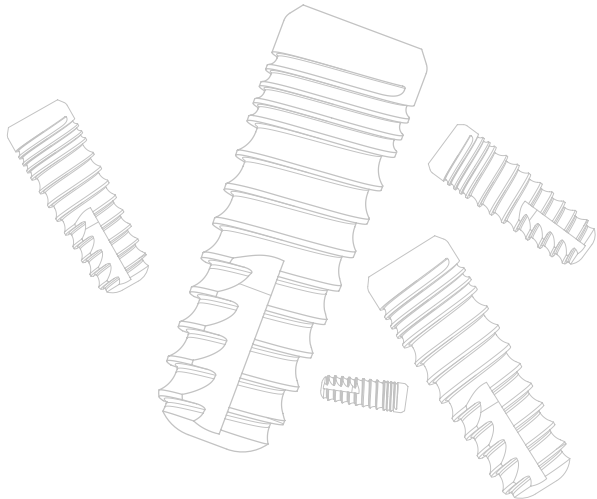


TERSİNE AÇILI GENİŞ YİV

BioInfinity dental implantları, kendinden kesen tersine açılı geniş yiv tasarımına sahiptir.

Tersine açılı geniş yivler ile;

- implant çene kemiğine yerleşirken sürtünerek değil de keserek yerleştiği için kemik - implant arasında minimum stres oluşmaktadır.
- yüzey alanı artırılarak osseointegrasyona olumlu katkı sağlanmaktadır.
- implantın sadece apekten değil yivlerden de tutunması ile maksimum primer stabilite elde edilmektedir.
- çekme kuvvetlerine karşı yüksek direnç gösterilerek immediat yüklemeye imkan sağlanmaktadır.
- sinüs tabanında daha güvenli bir kullanım avantajı sağlanmaktadır.

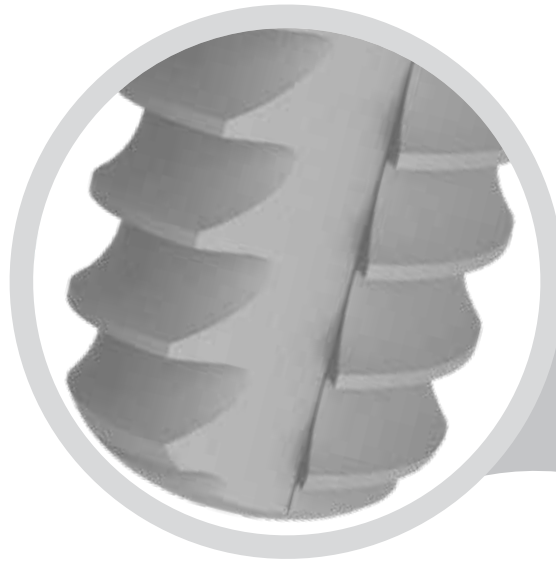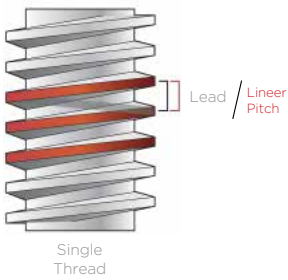

Sonlu eleman analizi çalışmalarına göre implant stabilitesi söz konusu olduğunda Single Thread (tek yollu yiv) implantların daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.

* Ma, P., Liu, H.C., Li, D.H., Lin, S., Shi, Z. & Peng, Q.J. (2007) influence of helix angle and density on primary stability of immediately loaded dental implants: Three-dimensional finite element analysis. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 42: 618-621.




CONFIX™ BAĞLANTI

BioInfinity dental implantlarında abutment - implant bağlantısı, mikro boşluk ve mikro hareketi engelleyen 11 derecelik konik hexagonal bağlantı ile sağlanmaktadır.

ConFix™ diğer bağlantı tiplerine kıyasla mikro sızıntıyı minimize ederek periimplantitis riskini azaltmaktadır.

ConFix™, oklüzal yükün implant - abutment arasında efektif bir biçimde dağılımına olanak sağlayarak yapıyı korumaktadır.

ConFix™, implant - abutment arasında yeterli yüzey alanı sağlayarak yanal hareketlere karşı direnç sağlar ve abutment vidasını kayma kuvvetlerine karşı korur. Konik hexagonal yapı ise abutmentin rotasyonunu engelleyerek, vida gevşemesini minimize etmektedir.

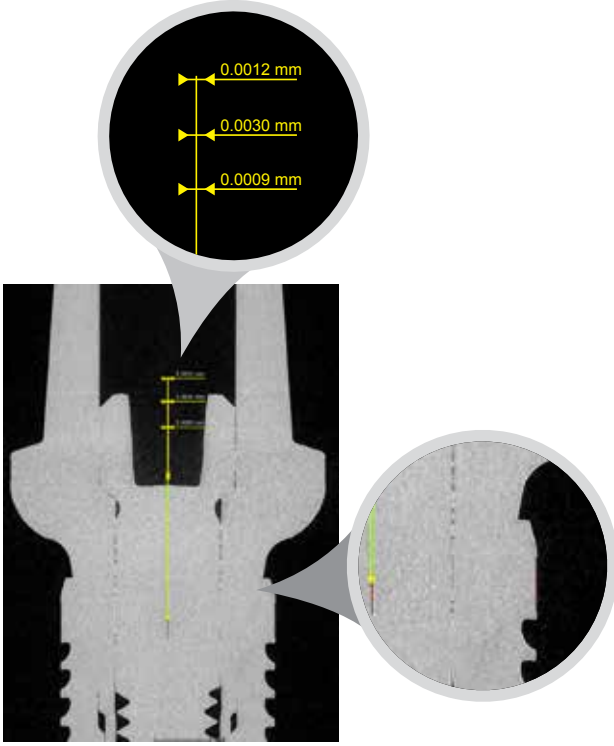

*25 Ncm ile torklanmış implant-abutment bağlantısının BT (Bilgisayarlı Tomografi) görüntüsü



EŞ MERKEZLİ ÜRETİM

Yapılan bilimsel çalışmalar, implantın üzerindeki yüklerin büyük bir kısmının implant - abutment bağlantısını sağlayan abutment vidası üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Dental implantların başarısız olma nedenleri incelendiğinde en yaygın olarak karşılaşılan sorunların başında vida - implant kırılmasının geldiği görülmektedir. Bunun nedeni ise, implant - abutment bağlantısında eş merkezliliğin sağlanamamasından kaynaklı homojen olmayan yük dağılımıdır.

BioInfinity dental implantlarında implant ve abutment arasındaki eş merkezlilik, yapılan ar-ge çalışmaları ve üretimdeki iyileştirmeler sonucunda sağlanmış, merkezler arasındaki fark minimuma indirilmiştir. Kalite kontrol departmanımızdaki yüksek hassasiyete sahip teknolojik cihazlar ile BioInfinity dental implantlarında eş merkezlilik garantisi altına alınmaktadır.



İÇ BÜKEY ABUTMENT

Bilimsel çalışmalar sonucunda, doğal dişlerin etrafındaki diş etinin, yüksekliğinin yarısı kadar kalınlığa sahip olduğunda bile sağlığını devam ettirebildiği; ancak implantların çevresindeki diş eti söz konusu olduğunda bu oranın tersine döndüğü, uzun dönem devamlılık için yüksekliğin iki katı kadar diş eti kalınlığına ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur.

BioInfinity'nin iç bükey çıkış profiline sahip abutment tasarımı sayesinde; periimplant diş etinin kalınlaşmasına izin vermekte ve uzun dönem periimplant yumuşak doku, dolayısıyla sert doku devamlılığı sağlanmaktadır.


Ayrıca BioInfinity'nin her endikasyona uygun, farklı diş eti yüksekliğine sahip simante abutmentleri, birincil periimplantitis nedeni olan taşkın siman artığı riskinden uzaklaşmayı mümkün kılmaktadır.



RENK KODLAMASI

BioInfinity dental implantlarındaki cerrahi ve protetik tüm bileşenlerde renk kodlaması bulunmaktadır.

Renk kodlaması ile cerrahi ve protetik uygulamalarda basit, hızlı ve güvenilir uygulama imkanı sağlanmaktadır.

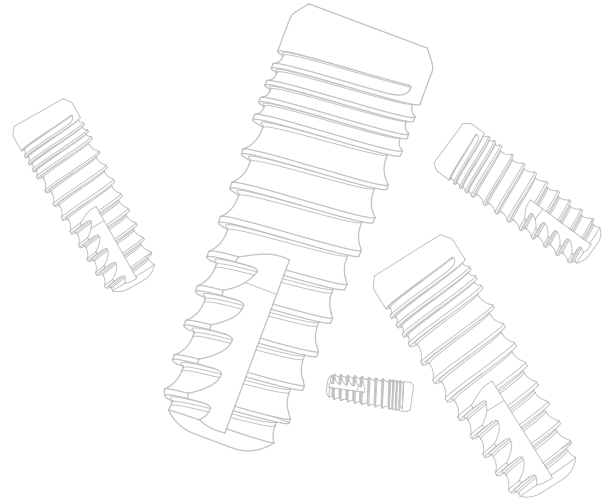

		
Protetik Renk Kodu	Junior	Standart
Cerrahi Renk Kodu	Ø 3.2	Ø 3.7 Ø 4.2 Ø 4.7 Ø 5.2
BONE LEVEL		   

BONE LEVEL İMLANT SİSTEMİ

Uzunluk	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
 					
		BR3210	BR3212	BR3214	BR3216
 					
	BR3708	BR3710	BR3712	BR3714	BR3716
 					
	BR4208	BR4210	BR4212	BR4214	BR4216
 					
	BR4708	BR4710	BR4712	BR4714	BR4716
 					
	BR5208	BR5210	BR5212	BR5214	

Kapama Vidası

Junior 	Standart 
	
BCSJ	BCSS

* İmplantlar kapama vidası ile paketlenmektedir.
* Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)



CNC / TALAŞLI ÜRETİM MERKEZİ



BONE LEVEL İMPLANT SİSTEMİ

CERRAHİ

CERRAHİ SET



Cerrahi Set (Komple)

Ürün Kodu | BSK2000



Bone Level Surgical Kit

	Starter	Pilot	Junior Platform					Standard Platform	Hex Drivers
Fissure	8 mm	PD							
FD	SD2208		Handpiece Short					BIDSH-S	12HDS-S
Round	10 mm	Drill	Handpiece Long					BIDSH-L	12HDS-L
RD	SD2210	SD32	CD37	CD42	CD47	CD52	Manuel / Ratchet Short	BIDSR-S	12HDR-S
Lindemann	12 mm	Depth Gauge	DG37	DG42	DG47	DG52	Manuel / Ratchet Long	BIDSR-L	12HDR-L
LD	SD2212	DG32	CS37	CS42	CS47	CS52			
Drill Extender	14 mm	Counter Sink	CS37	CS42	CS47	CS52			
DE	SD2214	CS32	TAP37	TAP42	TAP47	TAP52			
Hand Wrench	16 mm	Tap	Implant Drivers						
TAPHW	SD2216	TAP32							
Pin 0°	Pin 17°	Spare							
PP2228	BMU17PP								
Pin 0°	Pin 30°	Spare							
PP2228	BMU30PP								

SPTR

0 8 12 16
6 10 14

<http://ifu.avrupaimplants.com>

BioInfinity
dental implant system

BSK2000



İmplant çaplarına ait renk kodlaması her çapa ait; frez, derinlik ölçer, boyun açıcı ve yiv açıcılarda bulunmaktadır.



Başlangıç frezlerinde; 8, 10, 12, ve 14 mm stoperli, 16 mm stopersizdir.

Junior **J**

Standart **S**



İmplant taşıyıcılarının renk kodlaması; implantların protetik platformları ile aynıdır.



İmplant taşıyıcılarının üzerinde bulunan 6 kanaldan herhangi birisinin bukkale gelmesi açılı abutmentların daha optimal konumlandırılmasını sağlamaktadır.



Frez ve yiv açıcıların üzerindeki lazer çizgileri operasyon esnasında istenilen uzunluğa ulaşabilmek için tasarlanmıştır.



İmplant Yerleştirme Enstrümanı

Ürün Kodu | SPH1000



Cerrahi ve Protetik Torklu Ratchet

Ürün Kodu | SPTR

* Üst çene anterior bölgede implant yerleştirilmesi için tasarlanmıştır.

Başlangıç Frezi

Ø 2.2x8	Ø 2.2x10	Ø 2.2x12	Ø 2.2x14	Ø 2.2x16
---------	----------	----------	----------	----------



SD2208 | SD2210 | SD2212 | SD2214 | SD2216

Ø 3.2	Ø 3.7	Ø 4.2	Ø 4.7	Ø 5.2
-------	-------	-------	-------	-------

Final Frezi



SD32 | CD37 | CD42 | CD47 | CD52

Derinlik Ölçer




DG32 | DG37 | DG42 | DG47 | DG52

Boyun Açıcı



CS32 | CS37 | CS42 | CS47 | CS52

Yiv Açıcı

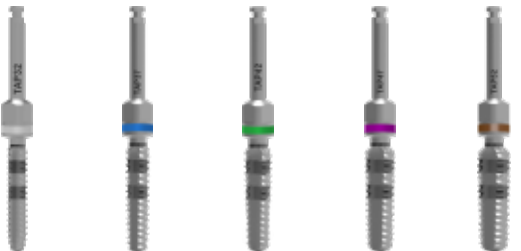

TAP32 | TAP37 | TAP42 | TAP47 | TAP52

Frez


Round	Fissure	Lindemann	Pilot
-------	---------	-----------	-------



RD | FD | LD | PD

İmplant Taşıyıcısı

El ile / Ratchet		Angldurva	
Uzun	Kısa	Uzun	Kısa

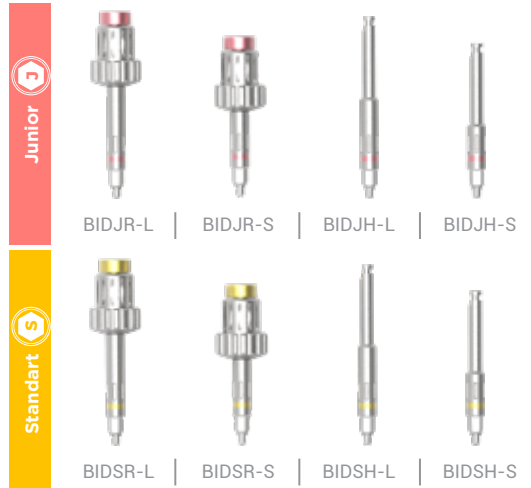BIDJR-L | BIDJR-S | BIDJH-L | BIDJH-S
BIDSRL | BIDSRL-S | BIDSRL-L | BIDSRL-S

Hex Driver

El ile / Ratchet		Angldurva	
Uzun	Kısa	Uzun	Kısa



12HDR-L | 12HDR-S | 12HDH-L | 12HDH-S

Pin

0°	17°	30°
----	-----	-----



PP2228 | BMU17PP | BMU30PP

Diğer

Hand Wrench	Frez Uzatıcısı
-------------	----------------



TAPHW | DE

FREZ PROTOKOLÜ

Üst Çene




Alt Çene

* Ø 3.2'lik implantın üst çene lateral, alt çene santral ve lateralde kullanılması tavsiye edilmektedir.

Üst Çene



Alt Çene

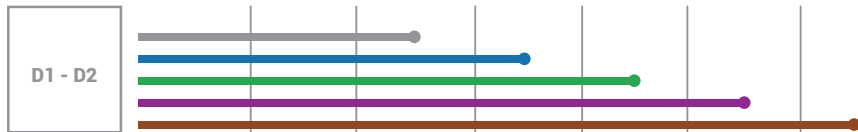

*Yiv açıcı sadece D1 kemik için önerilmektedir.



BONE LEVEL SHORT İMPLANT SİSTEMİ



BONE LEVEL SHORT HARD

Standart 		
Ø 4.2	Ø 4.7	Ø 5.2
		
BR4206H	BR4706H	BR5206H

BONE LEVEL SHORT SOFT

Standart 		
Ø 4.2	Ø 4.7	Ø 5.2
		
BR4206S	BR4706S	BR5206S

BONE LEVEL SHORT HARD



Ø 4.2
Ø 4.7
Ø 5.2

Frez Protokolü									
Başlangıç Frezi	Pilot Frez	3.2 Frez	3.7 Frez	4.2 Frez	4.2 Frez Short	4.7 Frez	4.7 Frez Short	5.2 Frez	5.2 Frez Short
SD2206	PD	SD32	CD37	CD42	SSD42	CD47	SSD47	CD52	SSD52
•	•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•		•	•		
•	•	•	•	•		•		•	•

Tüm kemik tipleri için tasarlanmıştır.
Yiv açıcı sadece D1 kemik için önerilmektedir.


BONE LEVEL SHORT SOFT



Ø 4.2
Ø 4.7
Ø 5.2

Frez Protokolü									
Başlangıç Frezi	Pilot Frez	3.2 Frez	3.7 Frez	4.2 Frez	4.2 Frez Short	4.7 Frez	4.7 Frez Short	5.2 Frez	5.2 Frez Short
SD2206	PD	SD32	CD37	CD42	SSD42	CD47	SSD47	CD52	SSD52
•	•	•	•						
•	•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•		•	•		

D3-D4 kemik tipleri için özel tasarlanmıştır.
Yiv açıcı kullanılmamalıdır.

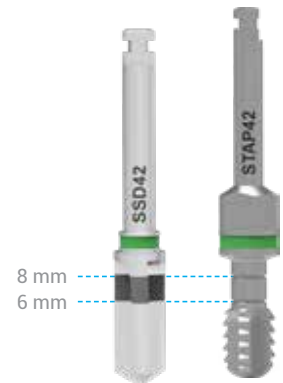

Short Cerrahi Set

Ürün Kodu | BSSKIT




KALİTE KONTROL MERKEZİ




BONE LEVEL İMPLANT SİSTEMİ

PROTEZ


Protetik Renk Kodu	Junior 	Standart 		
Çıkış Profili	Narrow (N)	Narrow (N)	Regular (R)	Wide (W)
Çıkış Profili Ø	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.5	Ø 6.5

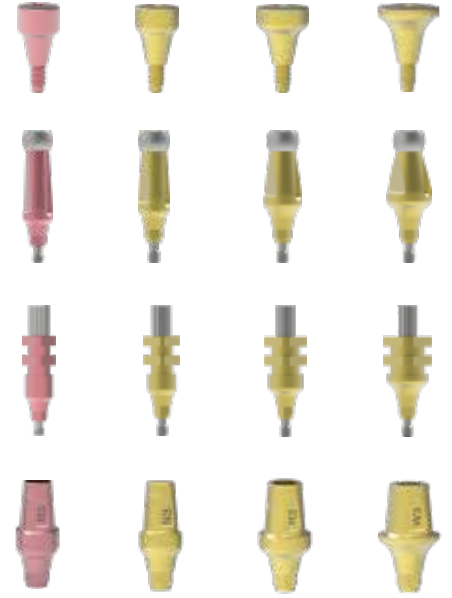


Tercih edeceğiniz abutment çıkış profili ile eş değer profile sahip diş eti şekillendiricisi ve transfer coping kullanılması gerekmektedir.

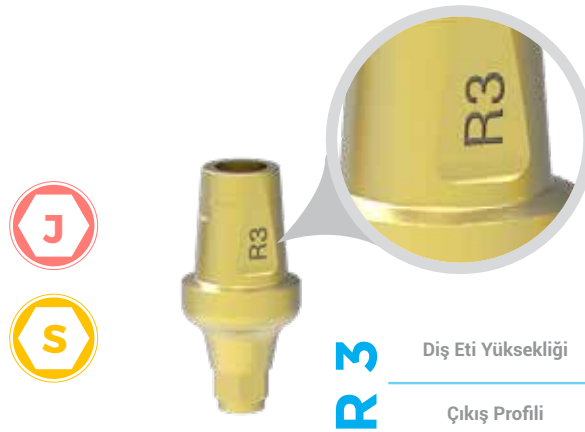


Protetik parçalarda bulunan renk kodlaması ve lazer markalama ile protetik uygulamalarda basit, hızlı ve güvenilir uygulama imkanı sağlanmaktadır.

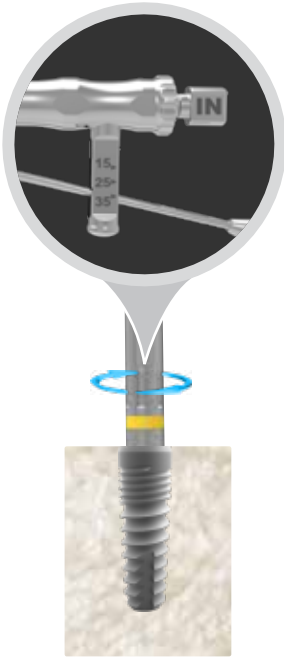

**İmplant
Yerleştirme**
≤ 35 Ncm

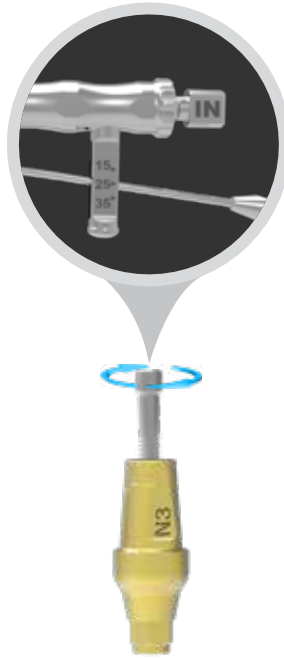

**İmplant Seviyesi
Final Restorasyonlar**
25 Ncm

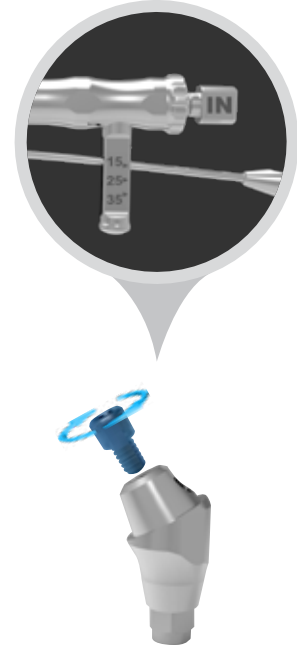



**Abutment Seviyesi
Final Restorasyonlar**
15 Ncm

Tork Rehberi	
Uygulama	Tork Değeri*
İmplant Yerleştirme	≤ 35 Ncm
Diş Eti Şekillendiricisi	El ile (5 - 10 Ncm)
Geçici Restorasyonlar	15 Ncm
İmplant Seviyesi Final Restorasyonlar	25 Ncm
Abutment Seviyesi Final Restorasyonlar	15 Ncm

*Tavsiye edilen tork değerleridir.



DİŞ ETİ ŞEKİLLENDİRİCİSİ

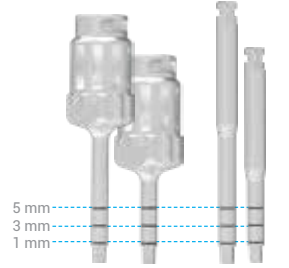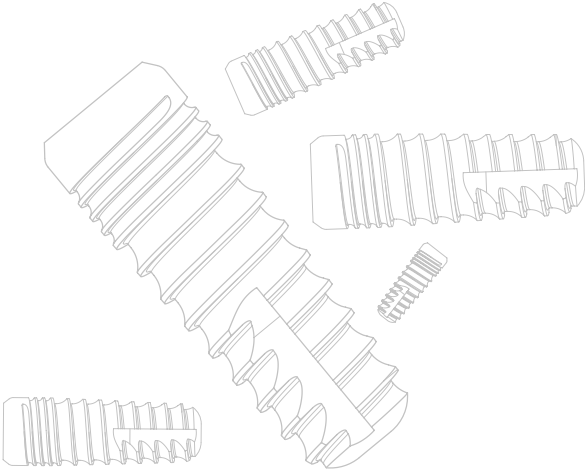

Hex Driver'ların üzerindeki çizgiler, uygun yükseklikte diş eti şekillendiricisi seçebilmek için tasarlanmıştır.

Dış Eti Yüksekliği	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	7 mm
Narrow 	 BHAJN1	 BHAJN2	 BHAJN3	 BHAJN4	 BHAJN5	 BHAJN7
Narrow 	 BHASN1	 BHASN2	 BHASN3	 BHASN4	 BHASN5	 BHASN7
Regular 	 BHASR2	 BHASR3	 BHASR4	 BHASR5	 BHASR7	
Wide 	 BHASW3	 BHASW4	 BHASW5	 BHASW7		

* Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)

* Vida tork değeri: El ile (5 - 10 Ncm)

TRANSFER COPING

Kapalı Kaşık

Junior 	Standart 		
Narrow (N)	Narrow (N)	Regular (R)	Wide (W)
			
BTCJN	BTCN	BTCR	BTCW

- * İmplant seviyesinde kapalı kaşık tekniği ile ölçü almak için tasarlanmıştır.
- * Junior platform için BTCScJ ve standart platform için BTCScS transfer coping vidası ile paketlenmiştir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork değeri: El ile (5 - 10 Ncm)

Açık Kaşık

Junior 	Standart 		
Narrow (N)	Narrow (N)	Regular (R)	Wide (W)
			
BICJN	BICN	BICR	BICW

- * İmplant seviyesinde açık kaşık tekniği ile ölçü almak için tasarlanmıştır.
- * Junior platform için BICScJ ve standart platform için BICScS transfer coping vidası ile paketlenmiştir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork değeri: El ile (5 - 10 Ncm)

Lab Analog

Junior 	Standart 
	
BLAJ	BLAS

- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)

LAB ANALOG

Lab Abutment Vidası

Junior 	Standart 
	
BASJ-LAB	BASS-LAB

- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)

LAB ABUTMENT VİDASI



LABORATUVAR

DÜZ ABUTMENT



Düz Abutment


Diş Eti Yüksekliği	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
Narrow 	 BSAJN1	 BSAJN2	 BSAJN3	 BSAJN4	 BSAJN5
Narrow 	 BSASN1	 BSASN2	 BSASN3	 BSASN4	 BSASN5
Regular 	 BSASR2	 BSASR3	 BSASR4	 BSASR5	
Wide 		 BSASW3	 BSASW4	 BSASW5	

- * Tek ve çok üyeli siman retansiyonlu restorasyonlar için tasarlanmıştır.
- * Junior platform için BASJ ve standart platform için BASS abutment vidası ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork değeri: 25 Ncm

AÇILI ESTETİK ABUTMENT

15° Açılı Estetik Abutment

Diş Eti Yüksekliği	1/2 mm	2/3 mm	3/4 mm	4/5 mm
--------------------	--------	--------	--------	--------

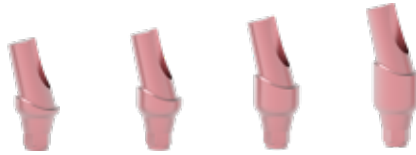

Narrow



BAEJ15N12 | BAEJ15N23 | BAEJ15N34 | BAEJ15N45



Narrow



BAES15N12 | BAES15N23 | BAES15N34 | BAES15N45



Regular



BAES15R23 | BAES15R34 | BAES15R45




Wide



BAES15W34 | BAES15W45

- * Tek ve çok üyeli siman retansiyonlu restorasyonlar için tasarlanmıştır.
- * Junior platform için BASJ ve standart platform için BASS abutment vidası ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork değeri: 25 Ncm

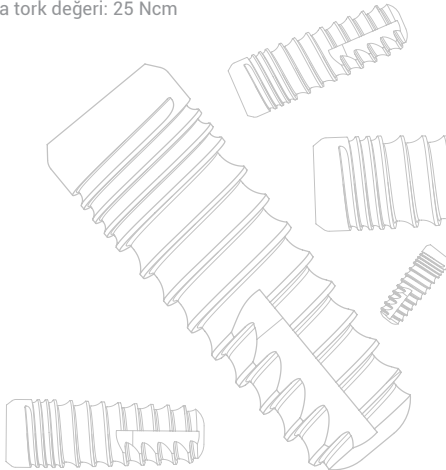

25° Açılı Estetik Abutment

1/2 mm	2/3 mm	3/4 mm	4/5 mm
--------	--------	--------	--------



BAES25N12 | BAES25N23 | BAES25N34 | BAES25N45



BAES25R23 | BAES25R34 | BAES25R45



BAES25W34 | BAES25W45

Abutment Vidası

Junior



Standart



BASJ



BASS

- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork değeri: 25 Ncm

GEÇİCİ ABUTMENT

Geçici Abutment - Titanyum

Junior (J)		Standart (S)				
Narrow (N)		Narrow (N)		Regular (R)		Wide (W)
1 mm	3 mm	1 mm	3 mm	2 mm	4 mm	3 mm



BTTAJN1-H | BTTAJN3-H | BTTASN1-H | BTTASN3-H | BTTASR2-H | BTTASR4-H | BTTASW3-H



BTTAJN1-NH | BTTAJN3-NH | BTTASN1-NH | BTTASN3-NH | BTTASR2-NH | BTTASR4-NH | BTTASW3-NH

- * Hexed; tek üyeli, siman ve vida retansiyonlu, Non-Hexed; çok üyeli, vida retansiyonlu ve geçici restorasyonlar için tasarlanmıştır.
- * Junior platform için BASJ ve standart platform için BASS abutment vidası ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork değeri: 15Ncm

Geçici Abutment - PEEK

Junior (J)		Standart (S)				
Narrow (N)		Narrow (N)		Regular (R)		Wide (W)
1 mm	3 mm	1 mm	3 mm	2 mm	4 mm	3 mm



BPTAJN1-H | BPTAJN3-H | BPTASN1-H | BPTASN3-H | BPTASR2-H | BPTASR4-H | BPTASW3-H



BPTAJN1-NH | BPTAJN3-NH | BPTASN1-NH | BPTASN3-NH | BPTASR2-NH | BPTASR4-NH | BPTASW3-NH

- * Hexed; tek üyeli, siman ve vida retansiyonlu, Non-Hexed; çok üyeli, vida retansiyonlu geçici restorasyonlar (30 güne kadar) için tasarlanmıştır.
- * Junior platform için BASJ ve standart platform için BASS abutment vidası ile paketlenmektedir.
- * Medical Grade PEEK
- * Vida tork değeri: 15Ncm



Hexed



Non-Hexed



Abutment Tutucu

Ürün Kodu | BTAH

Abutmentlar üzerinde yapılacak freze işlemlerinin elde yapılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.


BioMatrix™
Overdenture Solutions

BIOBALL™

BioBall™ Abutment

Diş Eti Yüksekliği	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
					
Junior 	BBAJN1	BBAJN2	BBAJN3	BBAJN4	BBAJN5
					
Standart 	BBASN1	BBASN2	BBASN3	BBASN4	BBASN5

- * Overdenture vakalar için tasarlanmıştır.
- * BioBall Set ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork değeri: 25 Ncm

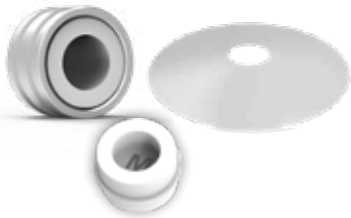

BioBall Set

Ürün Kodu | BBSET

- * BioBall Set içeriği;
Metal Housing (L Tutucu Şapka ile),
Korumucu Disk, M Tutucu Şapka



BioBall Lab Analog

Ürün Kodu | BBLA

- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)

BioBall™ Tutucu Şapka

L	S	M	H
Laboratuvar için	Düşük Tutucu	Orta Tutucu	Yüksek Tutucu
			
BBL4	BBS4	BBM4	BBH4

- * BioBall Tutucu Şapkalar; 4'lü paketlenmektedir.
- * Medical Grade PEEK

BioMatrix[™]
Overdenture Solutions

BioBall[™] PEEK tutucu şapkalar

tüm implant markalarının
Ø2.5 mm ball abutmentları
ile uyumludur



RHEIN83

 Rhein83



Ball Abutment Set

Ürün Kodu | BBASET

Ball Abutment Set içeriği; Inox Tutucu Yuva, Siyah Tutucu Şapka,
Pembe Tutucu Şapka, Şeffaf Tutucu Şapka, Koruyucu Disk

Ball Abutment Tutucu Şapka

Siyah	Pembe	Şeffaf
Laboratuvar için	900 gram	1300 gram
		
BBANI-B	BBANI-P	BBANI-C


BIOLOC™

BioInfinity

BioLoc™ Abutment

Diş Eti Yüksekliği	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	Açılı 1.5 mm	Açılı 3 mm
Junior	BLOAJ1	BLOAJ2	BLOAJ3	BLOAJ4	BLOAJ5	BLOAJ6	BLOA15J1.5	BLOA15J3
Standart	BLOAS1	BLOAS2	BLOAS3	BLOAS4	BLOAS5	BLOAS6	BLOA15S1.5	BLOA15S3

- * Overdenture vakalar için tasarlanmıştır.
- * BioLoc açılı abutment; junior platform için BASJ ve standart platform için BASS abutment vidası ile paketlenmektedir.
- * TiN kaplama
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork değeri: 25 Ncm

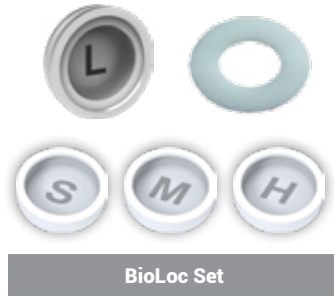

Ürün Kodu | BLSET

- * BioLoc Set içeriği; Metal Housing (L Tutucu Şapka ile), Koruyucu Disk, S Tutucu Şapka, M Tutucu Şapka, H Tutucu Şapka


BioLoc™ Tutucu Şapka

L	S	M	H
Laboratuvar için	Düşük Tutucu	Orta Tutucu	Yüksek Tutucu
BLL4	BLS4	BLM4	BLH4

- * BioLoc Tutucu Şapkalar; 4'ü paketlenmektedir.
- * Medical Grade PEEK

BioLoc™ Parçaları

Transfer Coping | Lab Analog

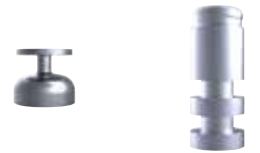

DKI4845

DKA3854

Tutucu Şapka Anahtarı



BioMatrix™ Overdenture Solutions

BioLoc™ PEEK tutucu şapkalar

tüm implant markalarının Locator abutmentları ile uyumludur*



*Locator, Zest Dental Solutions ürünüdür.

KERATOR

 Kerator

Kerator Abutment & Kit

Diş Eti Yüksekliği	Junior 	Standart 
1 mm	AT401	IS401
2 mm	AT402	IS402
3 mm	AT403	IS403
4 mm	AT404	IS404
5 mm	AT405	IS405
6 mm	AT406	IS406
Açılı 1.5 mm	AT4AN1.5	IS4AN1.5
Açılı 3 mm	AT4AN3	IS4AN3


Kerator Abutment & Kit içeriği; Kerator Abutment, Metal Housing (Siyah Tutucu Şapka ile), Koruyucu Disk, Pembe, Mavi, Kırmızı Tutucu Şapka

Kerator Tutucu Şapka (20°)

Mavi	Pembe	Beyaz
544 gr. 1.2 lbs	1088 gr. 2.4 lbs	1814 gr. 4 lbs
		
CPB	CPP	CPW

Kerator Tutucu Şapka - Açılı (40°)

Sarı	Kırmızı	Turuncu	Yeşil
0 gr. 0 lbs	362 gr. 0.8 lbs	816 gr. 1.8 lbs	1451 gr. 3.2 lbs
			
CPY	CPR	CPO	CPG

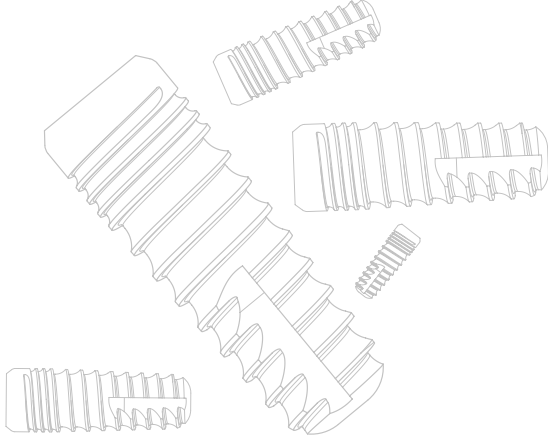

MULTİ UNIT SİSTEM

Multi Unit Düz Abutment

Dış Eti Yüksekliği	1 mm	3 mm	5 mm
--------------------	------	------	------

Junior



BMUAJ1

BMUAJ3

Standart



BMUAS1

BMUAS3

BMUAS5



Kapama Vidası

Ürün Kodu | BMUACC

Vida tork değeri:
El ile (5 - 10 Ncm)

- * Tek ve çok üyeli, abutment seviyesinde vidalı restorasyonlar, bar ataçmanlı overdenture ve hibrit protezler için tasarlanmıştır.
- * BMUACC kapama vidası ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork değeri: Hex adapter ile 25 Ncm

Multi Unit 17° Açılı Abutment

Dış Eti Yüksekliği	2 mm	3 mm	4 mm
--------------------	------	------	------

Junior



BMUA17J2

BMUA17J3

Standart



BMUA17S2

BMUA17S3

BMUA17S4

Multi Unit 30° Açılı Abutment

3 mm	4 mm	5 mm
------	------	------



BMUA30S3

BMUA30S4

BMUA30S5

- * Çok üyeli, abutment seviyesinde vidalı restorasyonlar, bar ataçmanlı overdenture ve hibrit protezler için tasarlanmıştır.
- * BMUACC kapama vidası ile paketlenmektedir.
- * Junior platform için BMASJ ve standart platform için BMASJ abutment vidası ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork değeri: Hex driver ile 25 Ncm

Multi Unit Coping



Plastik Coping Non-Hexed

Ürün Kodu | BMUCP-NH

- * Döküm tekniği ile bar ataçmanların ve çok üyeli vida retansiyonlu restorasyonların metal altyapısını üretmek için tasarlanmıştır.
- * İsteğe göre kesilebilir.
- * BMUACS coping vidası ile paketlenmektedir.
- * Acetal Resin



Pasif Fit Coping Non-Hexed

Ürün Kodu | BMUCPF

- * Döküm tekniği ile bar ataçmanların ve çok üyeli vida retansiyonlu restorasyonların metal altyapısını pasif fit tekniğine uygun olarak üretmek için tasarlanmıştır.
- * İsteğe göre kesilebilir.
- * Pasif fit parçası ve BMUACS coping vidası ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI) + Acetal Resin



Titanyum Coping Non-Hexed

Ürün Kodu | BMUCT-NH

- * Akrilik geçici ve final protez için tasarlanmıştır.
- * İsteğe göre kesilebilir.
- * BMUACS coping vidası ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)



Plastik Coping Hexed

Ürün Kodu | BMUCP-H

- * Sadece düz multi unit abutment ile kullanılabilir.
- * Döküm tekniği ile tek üyeli vida retansiyonlu restorasyonların metal altyapısını üretmek için tasarlanmıştır.
- * İsteğe göre kesilebilir.
- * BMUACS coping vidası ile paketlenmektedir.
- * Acetal Resin

Multi Unit Parçaları

**Transfer Coping
Açık Kaşık**



BMUAOT-H

**Transfer Coping
Kapalı Kaşık**



BMUACT-H

Lab Analog



BMULA-H



Hexed



BMUAOT-NH



BMUACT-NH



BMULA-NH



Non-Hexed

- * Hexed; multi unit düz abutment ve Non-Hexed; multi unit düz ve açılı abutment için tasarlanmıştır.
- * Vida tork değeri: El ile (5 - 10 Ncm)
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)



Coping Vidası

Ürün Kodu | BMUACS

*Vida tork değeri:
El ile veya 15 Ncm



Hex Adapter

Ürün Kodu | BMUHA

* Düz multi unit abutment taşımak ve torklamak için tasarlanmıştır.



Abutment Taşıyıcı

Ürün Kodu | BMUAD

* Açılı multi unit abutment taşımak için tasarlanmıştır.



K İ Ş İ Y E Ö Z E L Ç Ö Z Ü M L E R

Hızla yaygınlaşan dijital dişhekimliğinde, dental implant uygulamalarında, kişiye özel protetik çözümler için doğru çözüm ortaklarını seçmek, kliniklerin uzun süreli başarısı için yaşamsal bir öneme sahiptir.

UMC, BioInfinity kullanıcısı klinik ve laboratuvarları için hizmet veren bir tasarım ve üretim merkezidir.

exocad

dental wings

3shape

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

TiBase Abutment

Junior (J)			Standart (S)					
Narrow (N)			Narrow (N)			Regular (R)		Wide (W)
1 mm	2 mm	3 mm	1 mm	2 mm	3 mm	2 mm	3 mm	3 mm



BTBAJN1-H | BTBAJN2-H | BTBAJN3-H | BTBASN1-H | BTBASN2-H | BTBASN3-H | BTBASR2-H | BTBASR3-H | BTBASW3-H



BTBAJN1-NH | BTBAJN2-NH | BTBAJN3-NH | BTBASN1-NH | BTBASN2-NH | BTBASN3-NH | BTBASR2-NH | BTBASR3-NH | BTBASW3-NH

- * Vida ve siman retansiyonlu kişiye özel titanyum - seramik hibrit abutment üretimi için tasarlanmıştır.
- * Hexed; tek üyeli ve Non-Hexed; çok üyeli restorasyonlarda kullanılmaktadır.
- * Junior platform için BASJ ve standart platform için BASS abutment vidası ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork Değeri: 25 Ncm

Pre-milled Abutment

Junior (J)	Standart (S)
------------	--------------



BMAJ | BPMAS

- * Siman retansiyonlu restorasyonlarda kişiye özel titanyum abutment üretimi için tasarlanmıştır.
- * Junior platform için BASJ ve standart platform için BASS abutment vidası ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)
- * Vida tork Değeri: 25 Ncm

Custom Castable Abutment

Junior (J)		Standart (S)	
Hexed	Non- Hexed	Hexed	Non- Hexed



BCCAJ-H | BCCAJ-NH | BCCAS-H | BCCAS-NH

- * Hexed; tek üyeli, vida, siman retansiyonlu ve Non-Hexed; çok üyeli vida retansiyonlu kişiye özel restorasyonlar için tasarlanmıştır.
- * Junior platform için BASJ ve standart platform için BASS abutment vidası ile paketlenmektedir.
- * Acetal Resin
- * Vida tork değeri: 25 Ncm

Tarama Parçası

Junior (J)	Standart (S)	Multi Unit
------------	--------------	------------



BSBJ | BSBS | BMUSB

- * Ağız içi tarayıcı ve model tarayıcı için tasarlanmıştır.
- * Junior platform için BASJ ve standart platform için BASS abutment vidası ile paketlenmektedir.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)

Dijital Analog


Junior (J)	Standart (S)
------------	--------------



BDAJ | BDAS

- * 3 boyutlu yazıcıda üretilen reçine model için tasarlanmıştır.
- * Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)

ABUTMENT DENEME KİTİ

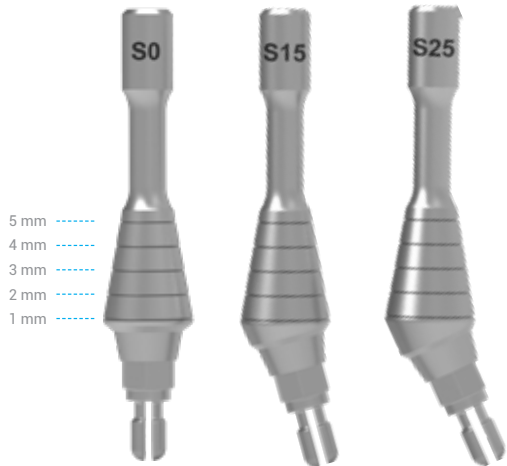

Abutment Deneme Kiti

Abutment Açısı	Junior 	Standart 
0°	TRYJ0	TRYS0
15°	TRYJ15	TRYS15
25°		TRYS25
17°	TRYJ17	TRYS17
30°		TRYS30

Ürün Kodu | TRYKIT

* Deneme abutmentleri, ideal bir üst yapı planlamasında uygun diş eti yüksekliği ve abutment açısının tespiti için tasarlanmıştır.

* Ti-Gr 23 (Ti6Al4V ELI)

YIKAMA ve STERİLİZASYON



Cerrahi setin kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

Cerrahi aletlerimiz non-steril olarak teslim edilmektedir. Kullanım öncesinde mutlaka temizlenmiş, dezenfekte ve steril edilmiş olmalıdır.

Hızlı sterilizasyon metotlarına müsaade edilmemelidir. Sıcak hava sterilizasyonu, radyasyon ile sterilizasyon, plazma sterilizasyonu, formaldehit veya etilen oksit sterilizasyon yöntemi kullanılmamalıdır. Cerrahi aletler 134° C'den (273° F) yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

Cerrahi aletler asla metal fırça veya çelik yünle temizlenmemelidir. Farklı malzemelerden üretilen aletler galvanik korozyon riski oluşturacağından aynı anda kesinlikle bir sıvı banyosuna yerleştirilmemelidir.

Suda çözünebilir, toksik olmayan, biyoçözünür ve hafif alkali bir temizlik ajanı kullanılması önerilmektedir. Klorin (çamaşır suyu, çeşme suyu vb.), oksalik asit veya hidrojen peroksit içeren temizlik veya dezenfeksiyon ürünlerinin kullanımı cerrahi aletlere zarar verip, oksidasyona sebep olacağından tercih edilmemelidir.

Frezlerin kullanımı sırasında kullanım kılavuzunda ve katalogta yer alan devir hızlarına (rpm) riayet etmeniz önerilir. Kemikte olası bir stres ve nekroz oluşumunu önlemek için frezlerin 25 kullanımda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

Önerilen sterilizasyon parametreleri

Dinamik hava tahliyesi (ön vakum buhar döngüsü)

Maruziyet sıcaklığı: 134°C	Maruziyet sıcaklığı: 121°C
Maruziyet süresi: 4 dakika	Maruziyet süresi: 20 dakika
Minimum kurutma süresi;	Minimum kurutma süresi;
Sarıllı cihazlar için: 15 dakika	Sarıllı cihazlar için: 15 dakika
Kap içindeki cihazlar için: 30 dakika	Kap içindeki cihazlar için: 30 dakika



OSSTELL


Osstell, iyileşme sürecini tehlikeye atmadan, implant stabilitesini objektif ve invaziv olmayan bir şekilde belirleyerek, osseointegrasyonun durumunu değerlendirmenize yardımcı olur. Osstell, bir implantın size ne zaman yüklemeye hazır olduğunu söyler.

BioInfinity dental implantlarının ISQ değerini Osstell ile ölçümleyebilirsiniz.



Osstell

Osstell IDx	Osstell ISQ
101000	100500

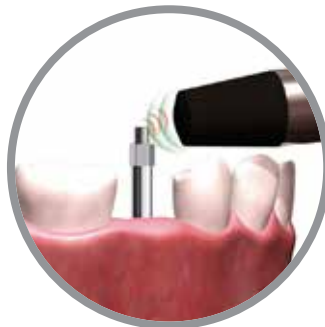

Smartpeg

Junior

Standart

Type 38

Type 26



100455

100425




CERRAHI EKİPMAN



Ultrasonik Piezo Cerrahi

200300

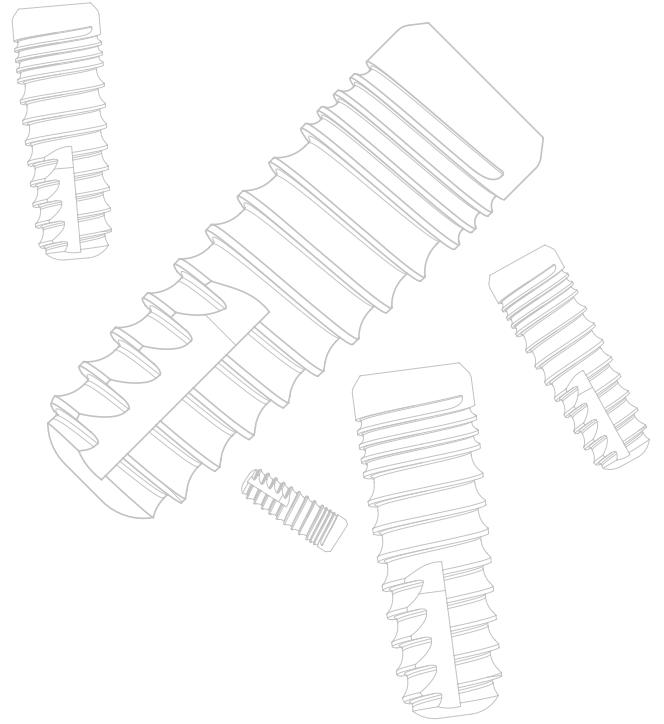

Fیزیdispanser

XCube

200200



Fیزیdispanser

Traus

200100



ADVANCED
IMPLANTOLOGY
ACADEMY

TEMEL VE İLERİ İMPLANTOLOJİ

KURS • SEMİNER • SEMPOZYUM

SEMBOLLER



Kutu ve Etiket Üzerindeki Sembollerin Açıklaması

Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama	Sembol	Açıklama
	Üretici		Sıcaklık sınırlaması		Junior platform
	CE uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluş numarası		Elektronik kullanım talimatı		Standart platform
	Katalog numarası		Işınlama kullanılarak steril edilmiştir		Ø 3.2 implant
	Seri numarası		Steril değildir		Ø 3.7 implant
	Tek kullanımlıktır		Yeniden steril edilemez		Ø 4.2 implant
	Kuru tutunuz		Ambalajı hasar görmüşse kullanmayınız		Ø 4.7 implant
	Son kullanma tarihi		Güneşten uzak tutunuz		Ø 5.2 implant

ÜRÜN LİSTESİ

İmplant

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sayfa No
BR3210.....	İmplant 3.2x10 mm.....	22
BR3212.....	İmplant 3.2x12 mm.....	22
BR3214.....	İmplant 3.2x14 mm.....	22
BR3216.....	İmplant 3.2x16 mm.....	22
BR3708.....	İmplant 3.7x08 mm.....	22
BR3710.....	İmplant 3.7x10 mm.....	22
BR3712.....	İmplant 3.7x12 mm.....	22
BR3714.....	İmplant 3.7x14 mm.....	22
BR3716.....	İmplant 3.7x16 mm.....	22
BR4208.....	İmplant 4.2x08 mm.....	22
BR4210.....	İmplant 4.2x10 mm.....	22
BR4212.....	İmplant 4.2x12 mm.....	22
BR4214.....	İmplant 4.2x14 mm.....	22
BR4216.....	İmplant 4.2x16 mm.....	22
BR4708.....	İmplant 4.7x08 mm.....	22
BR4710.....	İmplant 4.7x10 mm.....	22
BR4712.....	İmplant 4.7x12 mm.....	22
BR4714.....	İmplant 4.7x14 mm.....	22
BR4716.....	İmplant 4.7x16 mm.....	22
BR5208.....	İmplant 5.2x08 mm.....	22
BR5210.....	İmplant 5.2x10 mm.....	22
BR5212.....	İmplant 5.2x12 mm.....	22
BR5214.....	İmplant 5.2x14 mm.....	22
BR4206H.....	Short İmplant 4.2x06 mm (Sert).....	30
BR4206S.....	Short İmplant 4.2x06 mm (Yumuşak).....	30
BR4706H.....	Short İmplant 4.7x06 mm (Sert).....	30
BR4706S.....	Short İmplant 4.7x06 mm (Yumuşak).....	30
BR5206H.....	Short İmplant 5.2x06 mm (Sert).....	30
BR5206S.....	Short İmplant 5.2x06 mm (Yumuşak).....	30

Junior / Standart Platform

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sayfa No
BGSJ.....	Kapama Vidası Junior.....	22
BGSS.....	Kapama Vidası Standart.....	22
BHAJN1.....	Diş Eti Şekillendiricisi Junior Narrow 1 mm.....	36
BHAJN2.....	Diş Eti Şekillendiricisi Junior Narrow 2 mm.....	36
BHAJN3.....	Diş Eti Şekillendiricisi Junior Narrow 3 mm.....	36
BHAJN4.....	Diş Eti Şekillendiricisi Junior Narrow 4 mm.....	36
BHAJN5.....	Diş Eti Şekillendiricisi Junior Narrow 5 mm.....	36
BHAJN7.....	Diş Eti Şekillendiricisi Junior Narrow 7 mm.....	36
BHASN1.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Narrow 1 mm.....	36
BHASN2.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Narrow 2 mm.....	36
BHASN3.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Narrow 3 mm.....	36
BHASN4.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Narrow 4 mm.....	36
BHASN5.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Narrow 5 mm.....	36
BHASN7.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Narrow 7 mm.....	36
BHASR2.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Regular 2 mm.....	36
BHASR3.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Regular 3 mm.....	36
BHASR4.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Regular 4 mm.....	36
BHASR5.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Regular 5 mm.....	36
BHASR7.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Regular 7 mm.....	36
BHASW3.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Wide 3 mm.....	36
BHASW4.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Wide 4 mm.....	36
BHASW5.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Wide 5 mm.....	36
BHASW7.....	Diş Eti Şekillendiricisi Standart Wide 7 mm.....	36
BASJ-LAB.....	Lab Abutment Vidası Junior.....	37
BASS-LAB.....	Lab Abutment Vidası Standart.....	37
BLAJ.....	Lab Analog Junior.....	37

BLAS.....	Lab Analog Standart.....	37
BICJN.....	Transfer Coping Junior Narrow (Açık Kaşık).....	37
BTCJN.....	Transfer Coping Junior Narrow (Kapalı Kaşık).....	37
BICSCJ.....	Transfer Coping Vidası Junior (Açık Kaşık).....	37
BTCSCJ.....	Transfer Coping Vidası Junior (Kapalı Kaşık).....	37
BICSN.....	Transfer Coping Standart Narrow (Açık Kaşık).....	37
BTCN.....	Transfer Coping Standart Narrow (Kapalı Kaşık).....	37
BICSR.....	Transfer Coping Standart Regular (Açık Kaşık).....	37
BTCR.....	Transfer Coping Standart Regular (Kapalı Kaşık).....	37
BICSW.....	Transfer Coping Standart Wide (Açık Kaşık).....	37
BTCW.....	Transfer Coping Standart Wide (Kapalı Kaşık).....	37
BICSCS.....	Transfer Coping Vidası Standart (Açık Kaşık).....	37
BTCSCS.....	Transfer Coping Vidası Standart (Kapalı Kaşık).....	37
BSAJN1.....	Düz Abutment Junior Narrow 1 mm.....	39
BSAJN2.....	Düz Abutment Junior Narrow 2 mm.....	39
BSAJN3.....	Düz Abutment Junior Narrow 3 mm.....	39
BSAJN4.....	Düz Abutment Junior Narrow 4 mm.....	39
BSAJN5.....	Düz Abutment Junior Narrow 5 mm.....	39
BSASN1.....	Düz Abutment Standart Narrow 1 mm.....	39
BSASN2.....	Düz Abutment Standart Narrow 2 mm.....	39
BSASN3.....	Düz Abutment Standart Narrow 3 mm.....	39
BSASN4.....	Düz Abutment Standart Narrow 4 mm.....	39
BSASN5.....	Düz Abutment Standart Narrow 5 mm.....	39
BSASR2.....	Düz Abutment Standart Regular 2 mm.....	39
BSASR3.....	Düz Abutment Standart Regular 3 mm.....	39
BSASR4.....	Düz Abutment Standart Regular 4 mm.....	39
BSASR5.....	Düz Abutment Standart Regular 5 mm.....	39
BSASW3.....	Düz Abutment Standart Wide 3 mm.....	39
BSASW4.....	Düz Abutment Standart Wide 4 mm.....	39
BSASW5.....	Düz Abutment Standart Wide 5 mm.....	39
BASJ.....	Abutment Vidası Junior.....	40
BASS.....	Abutment Vidası Standart.....	40
BAEJ15N12.....	15° Açılı Estetik Abutment Junior Narrow 1-2 mm.....	40
BAEJ15N23.....	15° Açılı Estetik Abutment Junior Narrow 2-3 mm.....	40
BAEJ15N34.....	15° Açılı Estetik Abutment Junior Narrow 3-4 mm.....	40
BAEJ15N45.....	15° Açılı Estetik Abutment Junior Narrow 4-5 mm.....	40
BAES15N12.....	15° Açılı Estetik Abutment Standart Narrow 1-2 mm.....	40
BAES15N23.....	15° Açılı Estetik Abutment Standart Narrow 2-3 mm.....	40
BAES15N34.....	15° Açılı Estetik Abutment Standart Narrow 3-4 mm.....	40
BAES15N45.....	15° Açılı Estetik Abutment Standart Narrow 4-5 mm.....	40
BAES15R23.....	15° Açılı Estetik Abutment Standart Regular 2-3 mm.....	40
BAES15R34.....	15° Açılı Estetik Abutment Standart Regular 3-4 mm.....	40
BAES15R45.....	15° Açılı Estetik Abutment Standart Regular 4-5 mm.....	40
BAES15W34.....	15° Açılı Estetik Abutment Standart Wide 3-4 mm.....	40
BAES15W45.....	15° Açılı Estetik Abutment Standart Wide 4-5 mm.....	40
BAES25N12.....	25° Açılı Estetik Abutment Standart Narrow 1-2 mm.....	40
BAES25N23.....	25° Açılı Estetik Abutment Standart Narrow 2-3 mm.....	40
BAES25N34.....	25° Açılı Estetik Abutment Standart Narrow 3-4 mm.....	40
BAES25N45.....	25° Açılı Estetik Abutment Standart Narrow 4-5 mm.....	40
BAES25R23.....	25° Açılı Estetik Abutment Standart Regular 2-3 mm.....	40
BAES25R34.....	25° Açılı Estetik Abutment Standart Regular 3-4 mm.....	40
BAES25R45.....	25° Açılı Estetik Abutment Standart Regular 4-5 mm.....	40
BAES25W34.....	25° Açılı Estetik Abutment Standart Wide 3-4 mm.....	40

BAES25W45	25° Açılı Estetik Abutment Standart Wide 4-5 mm	40	BLOAJ6	BioLoc Abutment Junior 6 mm	44
BTAH	Abutment Tutucu	41	BLOAS15J1.5	BioLoc Abutment Junior Açılı 1.5 mm	44
BPTAJN1-H	Geçici Abutment PEEK Junior Narrow 1 mm Hexed	41	BLOAS15J3	BioLoc Abutment Junior Açılı 3 mm	44
BPTAJN1-NH	Geçici Abutment PEEK Junior Narrow 1 mm Non-Hexed	41	BLOAS1	BioLoc Abutment Standart 1 mm	44
BPTAJN3-H	Geçici Abutment PEEK Junior Narrow 3 mm Hexed	41	BLOAS2	BioLoc Abutment Standart 2 mm	44
BPTAJN3-NH	Geçici Abutment PEEK Junior Narrow 3 mm Non-Hexed	41	BLOAS3	BioLoc Abutment Standart 3 mm	44
BTTAJN1-H	Geçici Abutment Titanyum Junior Narrow 1 mm Hexed	41	BLOAS4	BioLoc Abutment Standart 4 mm	44
BTTAJN1-NH	Geçici Abutment Titanyum Junior Narrow 1 mm Non-Hexed	41	BLOAS5	BioLoc Abutment Standart 5 mm	44
BTTAJN3-H	Geçici Abutment Titanyum Junior Narrow 3 mm Hexed	41	BLOAS6	BioLoc Abutment Standart 6 mm	44
BTTAJN3-NH	Geçici Abutment Titanyum Junior Narrow 3 mm Non-Hexed	41	BLOAS15S1.5	BioLoc Abutment Standart Açılı 1.5 mm	44
BPTASN1-H	Geçici Abutment PEEK Standart Narrow 1 mm Hexed	41	BLOAS15S3	BioLoc Abutment Standart Açılı 3 mm	44
BPTASN1-NH	Geçici Abutment PEEK Standart Narrow 1 mm Non-Hexed	41	CPR	Kerator Tutucu Şapka Açılı Kırmızı	45
BPTASN3-H	Geçici Abutment PEEK Standart Narrow 3 mm Hexed	41	CPY	Kerator Tutucu Şapka Açılı Sarı	45
BPTASN3-NH	Geçici Abutment PEEK Standart Narrow 3 mm Non-Hexed	41	CPD	Kerator Tutucu Şapka Açılı Turuncu	45
BPTASR2-H	Geçici Abutment PEEK Standart Regular 2 mm Hexed	41	CPG	Kerator Tutucu Şapka Açılı Yeşil	45
BPTASR2-NH	Geçici Abutment PEEK Standart Regular 2 mm Non-Hexed	41	CPW	Kerator Tutucu Şapka Beyaz	45
BPTASR4-H	Geçici Abutment PEEK Standart Regular 4 mm Hexed	41	CPB	Kerator Tutucu Şapka Mavi	45
BPTASR4-NH	Geçici Abutment PEEK Standart Regular 4 mm Non-Hexed	41	CPP	Kerator Tutucu Şapka Pembe	45
BPTASW3-H	Geçici Abutment PEEK Standart Wide 3 mm Hexed	41	IS401	Kerator Abutment Standart 1 mm	45
BPTASW3-NH	Geçici Abutment PEEK Standart Wide 3 mm Non-Hexed	41	AT401	Kerator Abutment Junior 1 mm	45
BTTASN1-H	Geçici Abutment Titanyum Standart Narrow 1 mm Hexed	41	IS402	Kerator Abutment Standart 2 mm	45
BTTASN1-NH	Geçici Abutment Titanyum Standart Narrow 1 mm Non-Hexed	41	AT402	Kerator Abutment Junior 2 mm	45
BTTASN3-H	Geçici Abutment Titanyum Standart Narrow 3 mm Hexed	41	IS403	Kerator Abutment Standart 3 mm	45
BTTASN3-NH	Geçici Abutment Titanyum Standart Narrow 3 mm Non-Hexed	41	AT403	Kerator Abutment Junior 3 mm	45
BTTASR2-H	Geçici Abutment Titanyum Standart Regular 2 mm Hexed	41	IS404	Kerator Abutment Standart 4 mm	45
BTTASR2-NH	Geçici Abutment Titanyum Standart Regular 2 mm Non-Hexed	41	AT404	Kerator Abutment Junior 4 mm	45
BTTASR4-H	Geçici Abutment Titanyum Standart Regular 4 mm Hexed	41	IS405	Kerator Abutment Standart 5 mm	45
BTTASR4-NH	Geçici Abutment Titanyum Standart Regular 4 mm Non-Hexed	41	AT405	Kerator Abutment Junior 5 mm	45
BTTASW3-H	Geçici Abutment Titanyum Standart Wide 3 mm Hexed	41	IS406	Kerator Abutment Standart 6 mm	45
BTTASW3-NH	Geçici Abutment Titanyum Standart Wide 3 mm Non-Hexed	41	AT406	Kerator Abutment Junior 6 mm	45
BBLA	BioBall Lab Analog	42	IS4AN1.5	Kerator Abutment Standart Açılı 1.5 mm	45
BBAJN1	BioBall Abutment Junior Narrow 1 mm	42	AT4AN1.5	Kerator Abutment Junior Açılı 1.5 mm	45
BBAJN2	BioBall Abutment Junior Narrow 2 mm	42	IS4AN3	Kerator Abutment Standart Açılı 3 mm	45
BBAJN3	BioBall Abutment Junior Narrow 3 mm	42	AT4AN3	Kerator Abutment Junior Açılı 3 mm	45
BBAJN4	BioBall Abutment Junior Narrow 4 mm	42	BMUACC	Multi Unit Kapama Vidası	46
BBAJN5	BioBall Abutment Junior Narrow 5 mm	42	BMASJ	Multi Unit Abutment Vidası Junior	46
BBASN1	BioBall Abutment Standart Narrow 1 mm	42	BMASS	Multi Unit Abutment Vidası Standart	46
BBASN2	BioBall Abutment Standart Narrow 2 mm	42	BMUAJ1	Multi Unit Düz Abutment Junior 1 mm	46
BBASN3	BioBall Abutment Standart Narrow 3 mm	42	BMUAJ3	Multi Unit Düz Abutment Junior 3 mm	46
BBASN4	BioBall Abutment Standart Narrow 4 mm	42	BMUA17J2	Multi Unit 17° Açılı Abutment Junior 2 mm	46
BBASN5	BioBall Abutment Standart Narrow 5 mm	42	BMUA17J3	Multi Unit 17° Açılı Abutment Junior 3 mm	46
BBASET	Ball Abutment Set	43	BMUAS1	Multi Unit Düz Abutment Standart 1 mm	46
BBANI-P	Ball Abutment Tutucu Şapka Pembe	43	BMUAS3	Multi Unit Düz Abutment Standart 3 mm	46
BBANI-B	Ball Abutment Tutucu Şapka Siyah	43	BMUAS5	Multi Unit Düz Abutment Standart 5 mm	46
BBANI-C	Ball Abutment Tutucu Şapka Şeffaf	43	BMUA17S2	Multi Unit 17° Açılı Abutment Standart 2 mm	46
BBSET	BioBall Set	42	BMUA17S3	Multi Unit 17° Açılı Abutment Standart 3 mm	46
BBS4	BioBall Tutucu Şapka Düşük Tutucu	42	BMUA17S4	Multi Unit 17° Açılı Abutment Standart 4 mm	46
BBL4	BioLoc Tutucu Şapka Lab için	42	BMUA30S3	Multi Unit 30° Açılı Abutment Standart 3 mm	46
BBM4	BioBall Tutucu Şapka Orta Tutucu	42	BMUA30S4	Multi Unit 30° Açılı Abutment Standart 4 mm	46
BBH4	BioBall Tutucu Şapka Yüksek Tutucu	44	BMUA30S5	Multi Unit 30° Açılı Abutment Standart 5 mm	46
DKA3854	BioLoc Lab Analog	44	BMUHA	Multi Unit Hex Adapter	47
BLSET	BioLoc Set	44	BMUAD	Multi Unit Abutment Taşıyıcı	47
BLS4	BioLoc Tutucu Şapka Düşük Tutucu	44	BMUACS	Multi Unit Coping Vidası	47
BLL4	BioLoc Tutucu Şapka Lab için	44	BMULA-H	Multi Unit Lab Analog Hexed	47
BLM4	BioLoc Tutucu Şapka Orta Tutucu	44	BMULA-NH	Multi Unit Lab Analog Non-Hexed	47
BLH4	BioLoc Tutucu Şapka Yüksek Tutucu	44	BMUCPF	Multi Unit Pasif Fit Coping Non-Hexed	47
DKI4845	BioLoc Transfer Coping	44	BMUCP-H	Multi Unit Plastik Coping Hexed	47
KMT002	BioLoc Tutucu Şapka Anahtarı	44	BMUCP-NH	Multi Unit Plastik Coping Non-Hexed	47
BLOAJ1	BioLoc Abutment Junior 1 mm	44	BMUCT-NH	Multi Unit Titanyum Coping Non-Hexed	47
BLOAJ2	BioLoc Abutment Junior 2 mm	44	BMUAOT-H	Multi Unit Transfer Coping (Açık Kaşık) Hexed	47
BLOAJ3	BioLoc Abutment Junior 3 mm	44	BMUAOT-NH	Multi Unit Transfer Coping (Açık Kaşık) Non-Hexed	47
BLOAJ4	BioLoc Abutment Junior 4 mm	44	BMUACT-H	Multi Unit Transfer Coping (Kapalı Kaşık) Hexed	47
BLOAJ5	BioLoc Abutment Junior 5 mm	44	BMUACT-NH	Multi Unit Transfer Coping (Kapalı Kaşık) Non-Hexed	47

BMUAOTSC.....	Multi Unit Transfer Coping Vidası (Açık Kaşık).....	47
BMUACTSC.....	Multi Unit Transfer Coping Vidası (Kapalı Kaşık).....	47
BCCAJ-H.....	Custom Castable Abutment Junior Hexed.....	49
BCCAJ-NH.....	Custom Castable Abutment Junior Non-Hexed.....	49
BCCAS-H.....	Custom Castable Abutment Standart Hex.....	49
BCCAS-NH.....	Custom Castable Abutment Standart Non-Hexed.....	49
BMUSB.....	Tarama Parçası Multi Unit.....	49
BDAJ.....	Dijital Analog Junior.....	49
BDAS.....	Dijital Analog Standart.....	49
BSBJ.....	Tarama Parçası Junior.....	49
BSBS.....	Tarama Parçası Standart.....	49
BPMAJ.....	Pre-milled Abutment Junior.....	49
BPMAS.....	Pre-milled Abutment Standart.....	49
BTBAJN1-H.....	TiBase Abutment Junior Narrow 1 mm Hex.....	49
BTBAJN1-NH.....	TiBase Abutment Junior Narrow 1 mm Non-Hex.....	49
BTBAJN2-H.....	TiBase Abutment Junior Narrow 2 mm Hex.....	49
BTBAJN2-NH.....	TiBase Abutment Junior Narrow 2 mm Non-Hex.....	49
BTBAJN3-H.....	TiBase Abutment Junior Narrow 3 mm Hex.....	49
BTBAJN3-NH.....	TiBase Abutment Junior Narrow 3 mm Non-Hex.....	49
BTBASN1-H.....	TiBase Abutment Standart Narrow 1 mm Hex.....	49
BTBASN1-NH.....	TiBase Abutment Standart Narrow 1 mm Non-Hex.....	49
BTBASN2-H.....	TiBase Abutment Standart Narrow 2 mm Hex.....	49
BTBASN2-NH.....	TiBase Abutment Standart Narrow 2 mm Non-Hex.....	49
BTBASN3-H.....	TiBase Abutment Standart Narrow 3 mm Hex.....	49
BTBASN3-NH.....	TiBase Abutment Standart Narrow 3 mm Non-Hex.....	49
BTBASR2-H.....	TiBase Abutment Standart Regular 2 mm Hex.....	49
BTBASR2-NH.....	TiBase Abutment Standart Regular 2 mm Non-Hex.....	49
BTBASR3-H.....	TiBase Abutment Standart Regular 3 mm Hex.....	49
BTBASR3-NH.....	TiBase Abutment Standart Regular 3 mm Non-Hex.....	49
BTBASW3-H.....	TiBase Abutment Standart Wide 3 mm Hex.....	49
BTBASW3-NH.....	TiBase Abutment Standart Wide 3 mm Non-Hex.....	49
TRYKIT.....	Deneme Abutment Kiti.....	50
TRYJ0.....	Deneme Abutment Junior 0°.....	50
TRYJ15.....	Deneme Abutment Junior 15°.....	50
TRYJ17.....	Deneme Abutment Junior 17°.....	50
TRYJ0.....	Deneme Abutment Standart 0°.....	50
TRYJ15.....	Deneme Abutment Standart 15°.....	50
TRYJ17.....	Deneme Abutment Standart 17°.....	50
TRYJ25.....	Deneme Abutment Standart 25°.....	50
TRYJ30.....	Deneme Abutment Standart 30°.....	50

SD32.....	Final Frezi 3.2.....	28
CD37.....	Final Frezi 3.7.....	28
CD42.....	Final Frezi 4.2.....	28
CD47.....	Final Frezi 4.7.....	28
CD52.....	Final Frezi 5.2.....	28
FD.....	Fissure Frez.....	28
DE.....	Frez Uzaticısı.....	28
TAPHW.....	Hand Wrench.....	28
12HDS-S.....	Hex Driver Kısa (Angulduva).....	28
12HDS-R.....	Hex Driver Kısa (Manuel/Ratchet).....	28
12HDS-L.....	Hex Driver Uzun (Angulduva).....	28
12HDS-R.....	Hex Driver Uzun (Manuel/Ratchet).....	28
BIDJH-S.....	İmplant Taşıyıcısı, Junior Platform - Kısa (Angulduva).....	28
BIDJR-S.....	İmplant Taşıyıcısı, Junior Platform - Kısa (Manuel/Ratchet).....	28
BIDJH-L.....	İmplant Taşıyıcısı, Junior Platform - Uzun (Angulduva).....	28
BIDJR-L.....	İmplant Taşıyıcısı, Junior Platform - Uzun (Manuel/Ratchet).....	28
BIDSH-S.....	İmplant Taşıyıcısı, Standart Platform - Kısa (Angulduva).....	28
BIDSR-S.....	İmplant Taşıyıcısı, Standart Platform - Kısa (Manuel/Ratchet).....	28
BIDSH-L.....	İmplant Taşıyıcısı, Standart Platform - Uzun (Angulduva).....	28
BIDSR-L.....	İmplant Taşıyıcısı, Standart Platform - Uzun (Manuel/Ratchet).....	28
LD.....	Lindemann Frez.....	28
PD.....	Pilot Frez.....	28
PP2228.....	Pin 0°.....	28
BMU17PP.....	Pin 17°.....	28
BMU30PP.....	Pin 30°.....	28
RD.....	Round Frez.....	28
TAP32.....	Yiv Açıcı 3.2.....	28
TAP37.....	Yiv Açıcı 3.7.....	28
TAP42.....	Yiv Açıcı 4.2.....	28
TAP47.....	Yiv Açıcı 4.7.....	28
TAP52.....	Yiv Açıcı 5.2.....	28
SD2206.....	Başlangıç Frezi 06 mm - Short İmplant.....	31
BSSKIT.....	Cerrahi Set (Short İmplant).....	31
SSD42.....	Final Frezi - Short İmplant 4.2.....	31
SSD47.....	Final Frezi - Short İmplant 4.7.....	31
SSD52.....	Final Frezi - Short İmplant 5.2.....	31
STAP42.....	Yiv Açıcı - Short İmplant 4.2.....	31
STAP47.....	Yiv Açıcı - Short İmplant 4.7.....	31
STAP52.....	Yiv Açıcı - Short İmplant 5.2.....	31

Cerrahi Set

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sayfa No
BSK2000.....	Cerrahi Set (Komple).....	25
SPH1000.....	İmplant Yerleştirme Enstrümanı.....	27
SPTR.....	Cerrahi ve Protetik Torklu Ratchet.....	27
SD2208.....	Başlangıç Frezi 08 mm.....	28
SD2210.....	Başlangıç Frezi 10 mm.....	28
SD2212.....	Başlangıç Frezi 12 mm.....	28
SD2214.....	Başlangıç Frezi 14 mm.....	28
SD2216.....	Başlangıç Frezi 16 mm.....	28
CS32.....	Boyun Açıcı 3.2.....	28
CS37.....	Boyun Açıcı 3.7.....	28
CS42.....	Boyun Açıcı 4.2.....	28
CS47.....	Boyun Açıcı 4.7.....	28
CS52.....	Boyun Açıcı 5.2.....	28
DG32.....	Derinlik Ölçer 3.2.....	28
DG37.....	Derinlik Ölçer 3.7.....	28
DG42.....	Derinlik Ölçer 4.2.....	28
DG47.....	Derinlik Ölçer 4.7.....	28
DG52.....	Derinlik Ölçer 5.2.....	28

Diğer

Ürün Kodu	Ürün Adı	Sayfa No
101000.....	Osstell IDx.....	52
100500.....	Osstell ISQ.....	52
100455.....	SmartPeg Junior (Type 38).....	52
100425.....	SmartPeg Standart (Type 26).....	52
200100.....	Fizyodispenser - Traus.....	53
200200.....	Fizyodispenser - XCube.....	53
200300.....	Ultrasonik Piezo Cerrahi.....	53

NOTLAR

NOTLAR





bioinfinityimplants.com

avrupa
implant

Avrupa İmplant
İkitelli OSB HESKOP
M5 Blok No:82 34490
Başakşehir / İstanbul
Telefon : +90 212 670 13 00 (pbx)
Faks : +90 212 670 13 10
info@bioinfinityimplants.com

Rev. No: BPCTR-R004

avrupa
implant

bir

umy®
UTSAL MEDICAL

kuruluşudur.